

11

AJUSTEMENT DE LA TABLETTE

Pour installer la tablette, insérer les tiges dans les glissières rondes situées au-dessus des butées des hanches (**fig. 11a**). Soulever légèrement l'avant de la tablette vers le haut pour la glisser aisément puis relâcher-la à la position voulue. Le mécanisme bloquera alors la tablette à cet endroit. Pour plus de sécurité, serrer la manette à double pans sous la glissière ronde pour fixer la tablette (**fig. 11b**).



fig. 11a

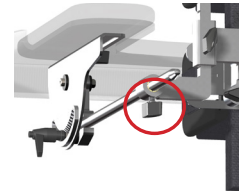


fig. 11b

Pour ajuster la hauteur de la tablette, desserrer la manette à double pans de chaque côté située au-dessus des butées des hanches (**fig. 11f**). Positionner la tablette jusqu'à la hauteur désirée puis resserrer. Pour incliner de la tablette, utiliser la manette à levier simple ajustable (**fig. 11c-d**). Soulever légèrement la poignée de la manette puis tourner en sens horaire pour le serrage et en sens anti-horaire (en soulevant) pour repositionner en position d'atteinte de la poignée.



fig.11f



fig. 11c

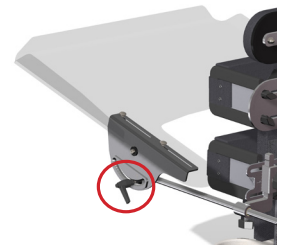


fig. 11d

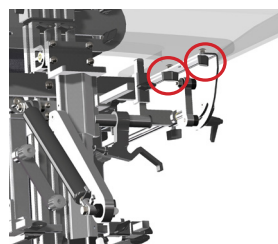


fig.11e

Pivoter la tablette jusqu'à l'angle souhaité puis resserrer la manette à levier simple ajustable. Pour l'ajustement en profondeur de la tablette, desserrer les deux manettes à double pans de chaque côté, situées sous la tablette à l'intérieur des supports de tablette (**fig. 11e**). Glisser la tablette sur sa glissière à l'endroit souhaité puis resserré les quatre manettes à double pans.