

CONSEILS TECHNIQUES

3

AJUSTEMENT DES APPUI-PIEDS

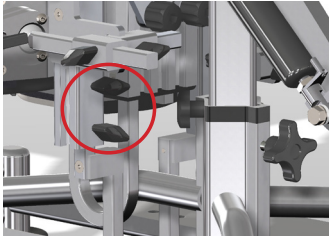


fig. 3c

Pour ajuster la hauteur des appui-pieds, desserrer les 2 manettes à double pans situées derrière le montant principal de la jambe du verticalisateur (**fig. 3c**). Glisser l'appui-pieds à la hauteur voulue puis resserrer fermement pour assurer que le poids de l'utilisateur soit bien supporté. Pour l'ajustement de la largeur des appui-pieds, utiliser la clé Allen située sur le côté du vérin (**fig. 3e**).

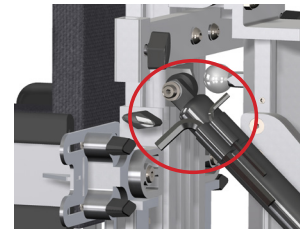


fig. 3e

Desserrer la vis sans tête à 6 pans creux située

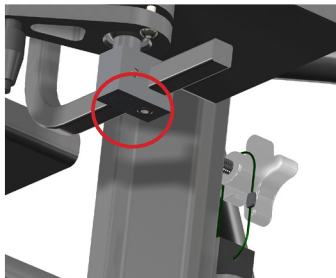


fig. 3b

sous le bloc, sous l'appui-pied (**fig. 3b**). Glisser l'appui-pied en largeur jusqu'à la position voulue et bien resserrer avec la clé Allen. Pour ajuster l'inclinaison, utiliser la manette à levier simple ajustable sous l'appui-pied (**fig.3d**). Soulever légèrement la poignée de la manette puis tourner en sens horaire pour le serrage et en sens anti-horaire (en soulevant) pour repositionner en position d'atteinte de la poignée. Pivoter la plaque de l'appui-pieds jusqu'à la position souhaitée et resserrer.



fig. 3d