

CHAISE DE BAIN

MANUEL DE L'UTILISATEUR





La couleur du produit peut varier dans ce document.

IMPORTANT

Ces instructions fournissent des informations importantes pour une utilisation et un entretien sûrs de la chaise de bain. Veuillez prendre le temps de lire les instructions ci-dessous ; le produit doit être utilisé conformément aux instructions afin d'éviter tout danger pour l'utilisateur.

Utilisation prévue

La chaise de bain est un siège de maintien qui soutient les enfants et les jeunes adultes pendant le bain ou la douche. Elle est destinée à une utilisation à l'intérieur, dans une salle de bain.

Contenu du produit

La chaise de bain est entièrement assemblée. Il vous suffit de positionner correctement le dossier, le repose-mollets et les pieds avant utilisation. Veuillez vérifier que vous disposez de tous les accessoires commandés.

Mise au rebut

Lorsqu'un produit atteint la fin de sa durée de vie, il doit être séparé par type de matériau afin que les pièces puissent être recyclées et éliminées en toute sécurité.

Entretien

Ce produit doit être inspecté, entretenu, nettoyé et/ou lavé régulièrement. Cessez d'utiliser la chaise de bain si elle est endommagée, cassée ou démontée. Contactez votre fournisseur pour une réparation ou un remplacement par un professionnel qualifié. Ne confiez pas la modification ou la réparation à des personnes non qualifiées. Toute modification ou réparation effectuée sans l'autorisation écrite du vendeur annulera la garantie.



RÉGLAGES



AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas l'utilisateur jouer avec ce produit.
- Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement réglés et serrés avant utilisation.
- Réglez la chaise de bain à une hauteur confortable avant d'y installer l'utilisateur. Si l'utilisateur se sent mal à l'aise, retirez-le de la chaise aussi vite que possible et en toute sécurité.
- À l'exception du réglage de l'inclinaison du repose-mollets, la chaise de bain ne doit pas être réglée lorsqu'elle est utilisée ou occupée.

Réglage du dossier



Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés.



Faites pivoter le dossier jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez les deux boutons jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Réglage du repose-mollets



Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés.



Faites pivoter le repose-mollets jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez les deux boutons jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.


Réglage de la patte arrière

Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés.




Faites pivoter la patte arrière jusqu'à la position souhaitée, relâchez les deux boutons jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Réglage de la patte avant et arrière

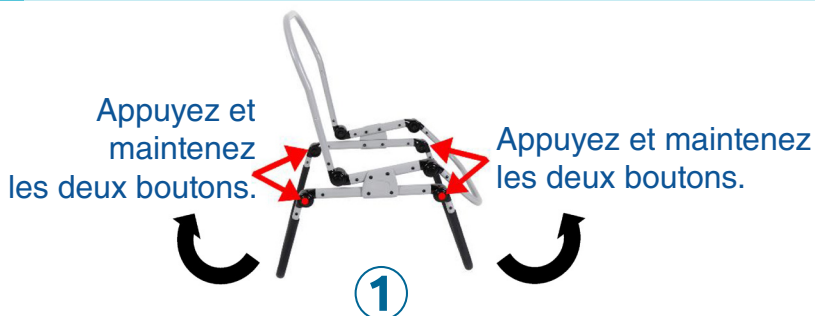


AVERTISSEMENT

La chaise de bain risque de basculer si les pattes avant et arrière sont positionnés à 90 degrés ou moins.

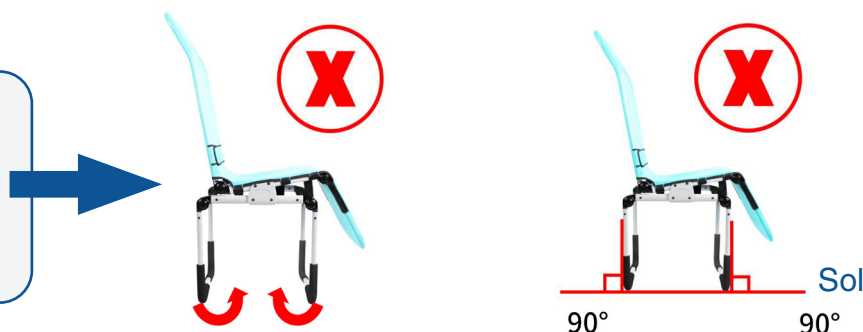

Pliage de la chaise

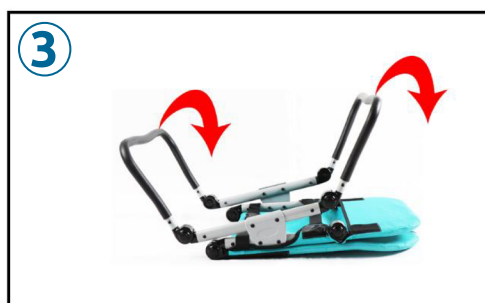

Pivoter la chaise de bain à 180°


Retrait de la housse de chaise



SUPPORT DE BAIGNOIRE / DOUCHE



Assemblage du support de baignoire/douche

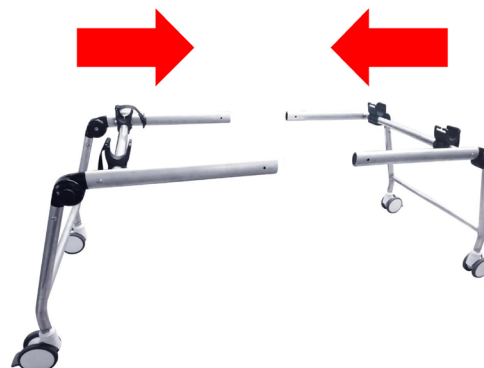


Pour assembler, appuyez sur le bouton du tube et maintenez-le enfoncé, puis insérez-le dans le tube plus large jusqu'à ce que le bouton ressorte du trou de ce dernier.


Une fois le support bien verrouillé et stable, il est prêt à l'emploi.

AVERTISSEMENT

Si les pattes du support de baignoire/douche sont à 90 degrés ou moins, il y a un risque élevé de basculement.
Poids maximal : 200 lb.

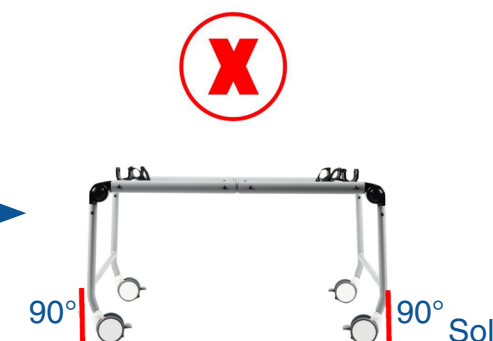

Pliage du support de baignoire/douche

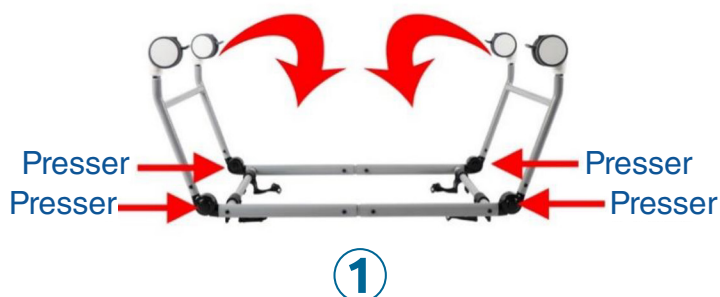

Fixation de la chaise de bain au support de baignoire/douche



AVERTISSEMENT

- Le support de baignoire/douche doit être utilisé uniquement avec la chaise de bain. Ce support est uniquement destiné au bain ; aucune autre utilisation n'est autorisée.
- Vérifiez que la chaise de bain est correctement fixée et stable sur le support avant utilisation.
- Ne soulevez JAMAIS le support de baignoire/douche avec une personne assise dessus.
- Inspectez régulièrement le support de baignoire/douche pour détecter tout dommage ou usure, et cessez toute utilisation si une pièce est cassée, déchirée ou manquante. Réparez ou remplacez toute pièce endommagée ou usée dès que possible.

Roulettes du support de douche

AVERTISSEMENT


Pour éviter les chutes ou les blessures, verrouillez toujours toutes les roulettes lorsque vous placez ou retirez l'utilisateur.



Nettoyage

Le support de baignoire/douche peut être nettoyé avec un chiffon humide et un produit nettoyant doux.

ACCESSOIRES

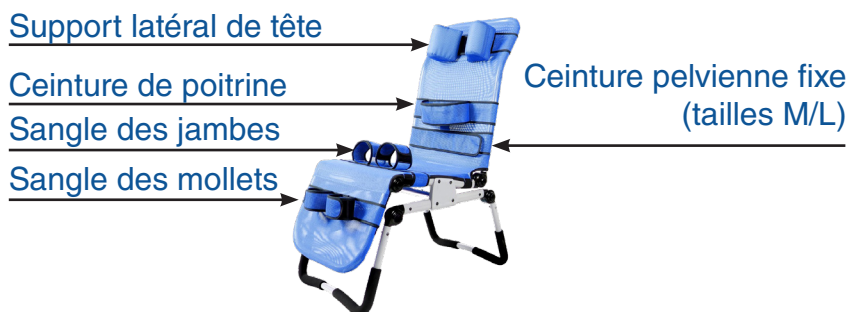


AVERTISSEMENT

- Les accessoires ne sont pas conçus pour un soutien prolongé.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont réglés pour plus de confort et de sécurité.
- Ne placez pas la ceinture thoracique et/ou la ceinture pelvienne autour du cou de l'utilisateur.

COMMENT FIXER LES ACCESSOIRES À LA CHAISE DE BAIN

Support latéral de tête

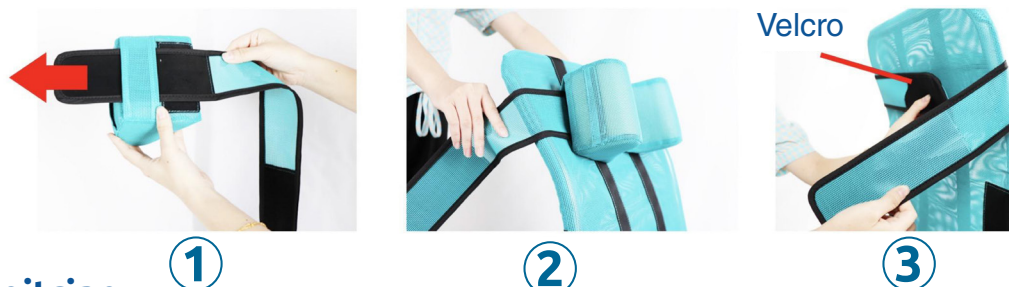

Ceinture de poitrine



Ceinture pelvienne fixe (tailles M/L)



Sangle des jambes



Sangle des mollets



①



②



③

Velcro



④

Nettoyage

- Le cadre de la chaise de bain peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent doux.
- La housse de la chaise de bain est amovible et lavable en machine :
 - Laver à l'eau tiède (40 °C) avec une lessive douce.
 - Placer la housse dans un filet à linge pour éviter de l'endommager lorsqu'elle est mise au lave-linge/sèche-linge.
 - Sécher au sèche-linge à basse température ou à sec. Ne pas utiliser d'eau de Javel, ni repasser. Ne pas nettoyer à sec.
- Les accessoires de la chaise de bain se lavent à la main :
 - Laver à l'eau tiède (30 °C) avec une lessive douce. Laisser sécher avant de remettre la chaise de bain.
 - Ne pas sécher au sèche-linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser d'eau de Javel, ni repasser.

Entretien

Après utilisation, il est important de rincer la chaise de bain à l'eau pour éliminer tout résidu de savon ou d'autres produits de bain.

Laissez la chaise de bain sécher dépliée, puis repliez-la une fois complètement sèche pour la ranger.

En cas d'humidité, rangez votre chaise de bain et ses accessoires dans un endroit relativement sec et laissez-les sécher dépliés pour éviter la formation de moisissures.

Une exposition prolongée au soleil peut altérer la couleur des matériaux.

Table des symboles



Marquage CE



Prudence



Ne pas javelliser



Dispositif médical



Nom du fabricant Adresse



Ne pas repasser



Lire les instructions avant utilisation




Pour usage intérieur



Température de l'eau de lavage en machine 40°C



Patient unique - usage multiple

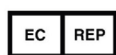

Représentant autorisé dans la communauté européenne



Non-Stérile

CARACTÉRISTIQUES CHAISE DE BAIN	TAILLES		
	PETIT	MOYEN	GRAND
Profondeur du siège	28 cm	35 cm	40 cm
Largeur du siège	43 cm	43 cm	43 cm
BHauteur du dossier	49 cm	60 cm	71,5 cm
Longueur de l'appui-mollet	25 cm	29,5 cm	34 cm
Longueur hors-tout à plat	100 cm	123 cm	142,5 cm
Largeur hors-tout	43,8 cm	43,8 cm	43,8 cm
Hauteur du siège au-dessus du sol	15-29,7 cm	15-33,8 cm	15-38 cm
Capacité de poids	72 kg (160 lbs)	72 kg (160 lbs)	72 kg (160 lbs)

Déclaration de garantie

La période de garantie du fournisseur est de 2 ans à compter de la date d'achat indiquée sur la facture. Cette garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à une mauvaise utilisation ou à une négligence du propriétaire. Elle ne couvre pas non plus les consommables tels que les pièces en caoutchouc, les housses et autres accessoires optionnels, qui sont sujets à une usure normale et nécessitent un remplacement périodique.

LA GARANTIE DU FOURNISSEUR SERA ANNULÉE DANS LES CIRCONSTANCES SUIVANTES :

- Modifications ou réparations effectuées par le client sans autorisation écrite préalable du vendeur.
- Défauts résultant d'une négligence ou d'un accident et/ou d'une utilisation ou d'un entretien autre que ceux indiqués dans le manuel d'utilisation.
- Montage ou installation incorrects de pièces tierces incompatibles avec le produit.
- Stockage/entretien inapproprié du produit.
- Dommages dus à des réparations effectuées par des personnes non autorisées ou à un démontage incorrect du produit.
- Insatisfaction du client concernant le produit en termes d'ajustement, de poids, de fonctionnalité, de couleur ou de design.

AVERTISSEMENT

- Les bébés et les jeunes enfants risquent de se noyer lorsqu'ils prennent leur bain. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez la chaise de bain dans une baignoire.
- Ne laissez jamais l'utilisateur sans surveillance, même quelques instants. La personne qui s'occupe de l'utilisateur doit être en contact permanent avec lui.
- Ne laissez jamais l'utilisateur se lever dans la chaise de bain.
- Ne pas placer et ne pas laisser la chaise de bain sur un sol accidenté, irrégulier ou en pente.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas placer la chaise de bain à proximité d'une source de chaleur telle que des cigarettes, l'électricité ou un feu ouvert.
- Pour éviter toute blessure, tenez l'utilisateur à distance lors du dépliage et du pliage de ce produit.
- La ceinture de poitrine peut provoquer un étranglement ; tous les accessoires doivent être soigneusement réglés pour le confort et la sécurité de l'utilisateur.
- Pour éviter toute blessure grave en cas de chute ou de glissement sur la chaise de bain, utilisez toujours des accessoires.
- Une surcharge, un pliage incorrect ou l'utilisation d'accessoires non approuvés peuvent endommager ou casser cette chaise de bain. Limite de poids maximale pour les trois tailles de chaise de bain : 72 kg.
- La chaise de bain doit être inspectée régulièrement pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas si une pièce est cassée, déchirée ou manquante. Les pièces endommagées ou usées doivent être réparées immédiatement.



1242 de Lanaudière
Joliette, Québec
Canada J6E 3P1



1-866-739-2400



www.synetikergocare.com

Synetik

ErgoCare

R00

*Imprimé au Canada - 2025
Les spécifications et les illustrations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.*